


# AUFBAUANLEITUNG



## CURE039

**CURE FACIAL**  
AQUAFACIAL GERÄT

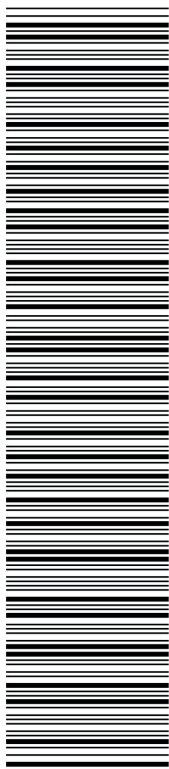

EAN-Code: 4270002627376

Cure Concept GmbH  
Bonner Str. 361  
40589 Düsseldorf  
HRB 107542  
Amtsgericht Düsseldorf

info@cureconcept.de  
02103/3399728  
www.cureconcept.de  
www.cureacademy.de

Ust ID: DE454385595  
Batt-Reg.-Nr.: DE58765315  
WEEE-Reg.-Nr.:  
DE47302623

# KOMPONENTEN

## LIEFERUMFANG



### 001 Handstückhalter

Der Handstückhalter ist dafür da, um dem Saughandstück und dem Cold Hammer halt im Gerät zu geben.

### 002 Ventil

Das Ventil reguliert den Druckausgleich im Gerät.

### 003 Saughandstück

Das Saughandstück ist das Herzstück der Behandlung, mit welchem den Großteil gearbeitet wird.

### 004 Cold Hammer

Das Cold Hammer ist eine zusätzliche Funktion des Cure Facials.

### 005 Aufsatzset

In dem Set sind alle Aufsätze zu finden, welche mit dem Cure Facial angewendet werden können.



### 006 EU Stecker Stromkabel

Der Stecker versorgt das Gerät mit Strom.



### 007 Lotionen Set

Alle Lotionen, die du für die Behandlung mit dem Cure Facial brauchst.





- 1 Stecke den Handstückhalter in die dafür vorgesehene Öffnung
- 2 Die Handstückhalter müssen richtig hineingedrückt werden und sollten nicht locker sitzen, so wie im Bild gezeigt.
- 3 So wie im Bild müssen die Handstückhalter fest sitzen.



- 1 Nehme das Ventil und stecke es in die dafür vorgesehenen Löcher.
- 2 Das Ventil muss richtig hineingedrückt werden und sollten nicht locker sitzen, so wie im Bild gezeigt.
- 3 So wie im Bild muss das Ventil fest sitzen - bis zum Anschlag.



- 1 Nehme das Saughandstück und stecke es in den Anschluss oben Rechts.
- 2 Achte darauf, dass es fest sitzt.
- 3 Platziere das Handstück nun um vorher befestigten Handstückhalter.

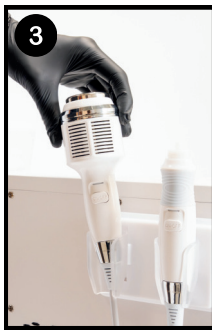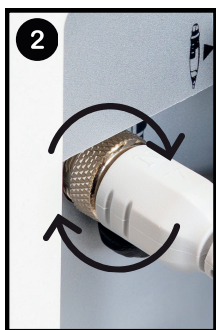


- 1 Nehme den Cold Hammer und stecke ihn in den Anschluss oben links.
- 2 Drehe den Anschluss mit dem silbernen Ring fest.
- 3 Platziere den Cold Hammer nun um vorher befestigten Handstückhalter.

# AUFBAU

## Schritt 5



1  
Nehme die Lotion und führe den kleinen durchsichtigen Schlauch in die Öffnung der Flasche.

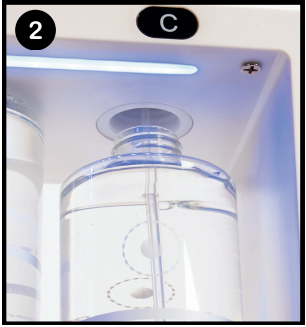

2  
Führe die Flasche an das Gewinde im Gerät.



3  
Drehe die Flasche fest.



4  
Nun müssen alle Flaschen fest sitzen, so wie hier abgebildet.

# AUFBAU

## Schritt 6



1  
Stecke den EU-Stecker in das Gerät.



Achte darauf, dass er richtig sitzt.



2  
Stecke ihn jetzt an den Strom.



3  
Bestätige den Roten Schalter auf der Rückseite des Gerätes.



1 Entnehme den passenden Aufsatz aus dem Aufsätze-Set. Die Cure Academy hilft dir bei der richtigen Auswahl.



2 Drück den Aufsatz auf das Saughandstück.



3 Achte darauf, dass der Aufsatz richtig sitzt. Es kann helfen ihn drauf zu drehen.



4 Wenn der Aufsatz nicht richtig sitzt, kann es Einschränkungen in der Funktion des Gerätes geben.


# FUNKTIONEN

## AQUAFACIAL

### Schritt 8

Hier gelangst du zur Steuerung der Aquafacial-Fuktion.

Hier gelangst du zur Steuerung des Cold Hammers.

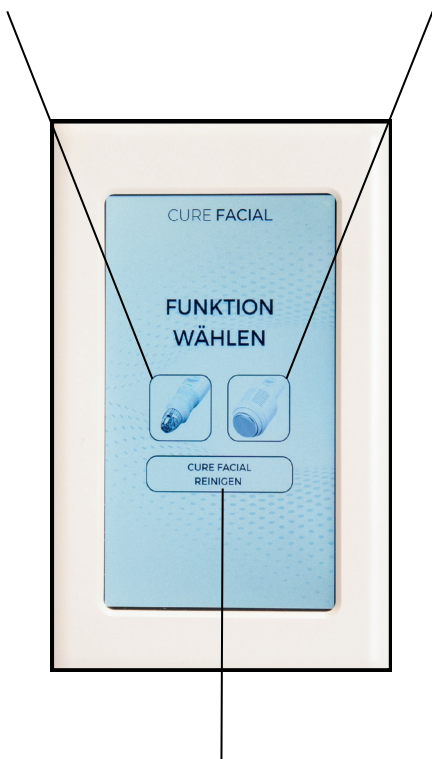

Hier gelangst du zur Reinigungsfunktion des Cure Facials.

# FUNKTIONEN

## Schritt 9

### AQUAFACIAL



#### Aquafacial Funktion


Wähle die Aquafacial Funktion aus, um mit der Behandlung starten zu können. Mit dem Klick auf das Symbol des Aquafacial Handstücks, gelangst du zu den ersten Schritten, welche du für die Aquafacial Behandlung brauchst.



Jetzt befindest du dich im ersten Schritt mit dem Cure Facial und der Aquafacial Behandlung.

#### WICHTIG ⚠️

Achte darauf, dass der Regler unter dem Bildschirm auf A gestellt ist.

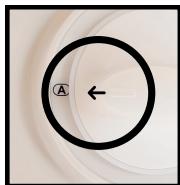

#### HINWEIS ⚠️

Das sind Hinweise und keine Fehlermeldungen.

# FUNKTIONEN

## Schritt 10

### AQUAFACIAL

Hier gelangst du zur vorherigen Anzeige.

Hier gelangst du zum nächsten Schritt



Hier startest du die Saug-Funktion des Handstücks.



# FUNKTIONEN

## AQUAFACIAL

### Schritt 11

Mit dem Regler auf der linken Seite (über dem Wassersymbol) stellst du die Flüssigkeitsmenge ein.

Mit dem Regler auf der rechten Seite (über dem Luftsymbol) stellst du die Saug-/Vakuumstärke ein.



Über den "A B C - Regler" steuert du die Lotion-Quelle und stellst die gewünschte Behandlungsstufe ein.



#### **ACHTUNG:**

Achte immer darauf, die Flüssigkeit mit dem Handrücken anzuziehen um die Flüssigkeit für die Behandlung nach vorne zu transportieren.

# FUNKTIONEN

## COLD-HAMMER

### Schritt 12



#### Cold Hammer Funktion

Wähle die Cold-Hammer Funktion aus, um mit der Behandlung starten zu können.

Mit dem Klick auf das Symbol des Cold Hammer-Handstücks, gelangst du zum Betätigungsfeld.



Mit dem Klick auf das Symbol des Cold-Hammers befindest du dich im Funktionsdisplay für die ausgewählte Funktion des Cold Hammers.



#### **HINWEIS**

Das sind Hinweise und keine Fehlermeldungen.

# HINWEISE



## Wichtiger Hinweis zur Gerätesicherheit

Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob der Dichtungsring korrekt eingesetzt und fest anliegend montiert ist.


Ein nicht ordnungsgemäß sitzender Dichtungsring kann die Vakuumbildung verhindern und dazu führen, dass das Gerät nicht einwandfrei funktioniert. Dies kann die Sicherheit und Wirksamkeit der Anwendung beeinträchtigen.



Der Abfallbehälter muss korrekt in die Schiene eingesetzt und vollständig eingeschoben sein. Andernfalls kann die Funktion des Geräts beeinträchtigt werden.

Der Abfallbehälter muss vollständig eingesetzt sein. Ein absteher Behälter (siehe Abbildung) ist unzulässig und beeinträchtigt die Funktion des Geräts.

# BEHANDLUNGS- ANLEITUNG

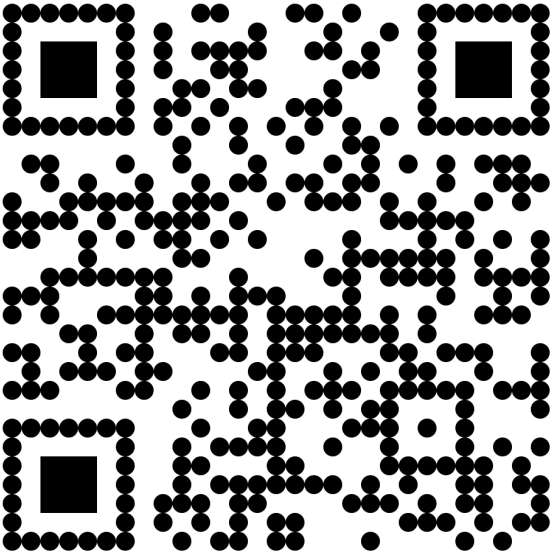



**CURE CONCEPT<sup>®</sup>**

Cure Concept GmbH  
Bonner Straße 361  
D-40589 Düsseldorf  
info@cureconcept.de  
www.cureconcept.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE47302623  
UST ID: DE454385595