


AUFBAUANLEITUNG



CURE039

CURE FACIAL

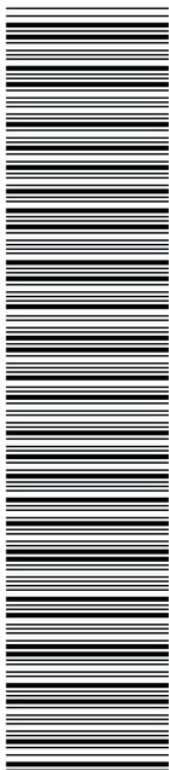

EAN-Code: 4270002627376

Cure Concept GmbH
Bonner Str. 361
40589 Düsseldorf
HRB 107542
Amtsgericht Düsseldorf

info@cureconcept.de
02103/3399728
www.cureconcept.de
www.cureacademy.de

Ust ID: DE454385595
Batt-Reg.-Nr.: DE58765315
WEEE-Reg.-Nr.:
DE47302623

KOMPONENTEN



001 Handstückhalter

Der Handstückhalter ist dafür da, um dem Saughandstück und dem Cold Hammer halt im Gerät zu geben.

002 Ventil

Das Ventil reguliert den Druckausgleich im Gerät.

003 Saughandstück

Das Saughandstück ist das Herzstück der Behandlung, mit welchem den Großteil gearbeitet wird.

004 Cold Hammer

Das Cold Hammer ist eine zusätzliche Funktion des Cure Facials.

005 Aufsatzset

In dem Set sind alle Aufsätze zu finden, welche mit dem Cure Facial angewendet werden können.



006 EU Stecker Stromkabel

Der Stecker versorgt das Gerät mit Strom.



007 Lotionen Set

Alle Lotionen, die du für die Behandlung mit dem Cure Facial brauchst.



WARNHINWEIS

1. Anwendung nur durch geschultes Fachpersonal
Dieses Gerät darf ausschließlich von geschultem Fachpersonal verwendet werden. Unsachgemäße Anwendung kann zu Hautschäden führen.

2. Nicht auf verletzter oder erkrankter Haut anwenden
Die Behandlung darf nicht durchgeführt werden bei:

- offenen Wunden
- entzündlicher Akne (stark ausgeprägt)
- Hautinfektionen (z. B. Herpes, Pilzinfektionen)
- frischen Narben oder Sonnenbrand

3. Vorsicht bei sensibler Haut / Vorerkrankungen

Bei folgenden Zuständen nur nach Rücksprache oder mit besonderer Vorsicht behandeln:

- Rosacea / Couperose
- sehr empfindliche Haut
- Einnahme von Retinoiden oder blutverdünnenden Medikamenten
- dermatologische Behandlungen (z. B. chemische Peelings, Laser) in den letzten Wochen




- 1 Stecke den Handstückhalter in die dafür vorgesehene Öffnung Die
- 2 Handstückhalter müssen richtig hineingedrückt werden und sollten nicht locker sitzen, so wie im Bild gezeigt.
- 3 So wie im Bild müssen die Handstückhalter fest sitzen.



- 1 Nehme das Ventil und stecke es in die dafür vorgesehenen Löcher.
- 2 Das Ventil muss richtig hineingedrückt werden und sollten nicht locker sitzen, so wie im Bild gezeigt.
- 3 So wie im Bild muss das Ventil fest sitzen - bis zum Anschlag.



- 1 Nehme das Saughandstück und stecke es in den Anschluss oben Rechts.
- 2 Achte darauf, dass es fest sitzt.
- 3 Platziere das Handstück nun um vorher befestigten Handstückhalter.

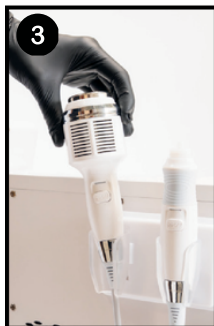

- 1 Nehme den Cold Hammer und Stecke ihn in den Anschluss oben Links.
- 2 Drehe den Anschluss mit dem silbernen Ring fest.
- 3 Platziere den Cold Hammer nun um vorher befestigten Handstückhalter.

AUFBAU



1 Nehme die Lotion und führen den kleinen durchsichtigen Schlauch in die Öffnung der Flasche.



2 Führe die Flasche an das Gewinde im Gerät.



3 Drehe die Flasche fest.



4 Nun müssen alle Flaschen fest sitzen, so wie hier abgebildet.



WARNHINWEIS

1. Augenkontakt vermeiden
Die Behandlung darf nicht im direkten Augenbereich durchgeführt werden. Kontakt der Lösungen mit den Augen ist unbedingt zu vermeiden.

2. Nur geeignete Lösungen verwenden
Es dürfen ausschließlich für das Gerät zugelassene und geeignete Wirkstofflösungen verwendet werden.

AUFBAU



Stecke den EU-Stecker in das Gerät.



Achte darauf, dass er richtig sitzt.



Stecke ihn jetzt an den Strom.



Bestätige den Roten Schalter auf der Rückseite des Gerätes.

AUFBAU



Entnehme den passenden Aufsatz aus dem Aufsätze-Set. Die Cure Academy hilft dir bei der richtigen Auswahl.



Achte darauf, dass der Aufsatz richtig sitzt. Es kann helfen ihn drauf zu drehen.



Wenn der Aufsatz nicht richtig sitzt, kann es Einschränkungen in der Funktion des Gerätes geben.



WARNHINWEIS


Hygienerichtlinien strikt einhalten

- Aufsätze müssen nach jeder Behandlung gereinigt und desinfiziert werden
- Einwegmaterialien dürfen nicht wiederverwendet werden
- Kreuzkontamination ist zu vermeiden

FUNKTIONEN

Hier gelangst du zur Steuerung der Aquafacial-Fuktion.

Hier gelangst du zur Steuerung des Cold Hammers.

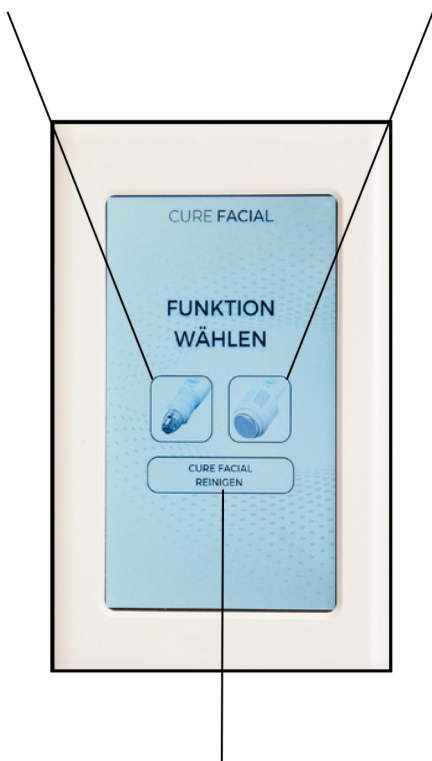

Hier gelangst du zur Reinigungsfunktion des Cure Facials.

FUNKTIONEN



Aquafacial Funktion


Wähle die Aquafacial Funktion aus, um mit der Behandlung starten zu können. Mit dem Klick auf das Symbol des Aquafacial Handstücks, gelangst du zu den ersten Schritten, welche du für die Aquafacial Behandlung brauchst.



Jetzt befindest du dich im ersten Schritt mit dem Cure Facial und der Aquafacial Behandlung.

WICHTIG ⚠

Achte darauf, dass der Regler unter dem Bildschirm auf A gestellt ist.

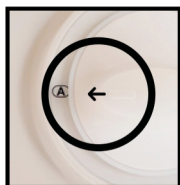

HINWEIS ⚠

Dass sind Hinweise und keine Fehlermeldungen.

FUNKTIONEN

Hier gelangst du zur vorherigen Anzeige.

Hier gelangst du zum nächsten Schritt




Hier startest du die Saug-Funktion des Handstücks.




FUNKTIONEN

Mit dem Regler auf der linken Seite (über dem Wassersymbol) stellst du die Flüssigkeitsmenge ein.

Mit dem Regler auf der rechten Seite (über dem Luftsymbol) stellst du die Saug-/Vakuumstärke ein.

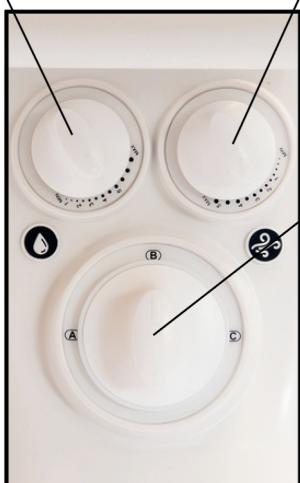

Über den "A B C - Regler" steuert du die Lotion-Quelle und stellst die gewünschte Behandlungsstufe ein.

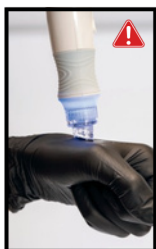

ACHTUNG:

Achte immer darauf, die Flüssigkeit mit dem Handrücken anzuziehen um die Flüssigkeit für die Behandlung nach vorne zu transportieren.

FUNKTIONEN




Cold Hammer Funktion

Wähle die Cold-Hammer Funktion aus, um mit der Behandlung starten zu können.

Mit dem Klick auf das Symbol des Cold Hammer-Handstücks, gelangst du zum Betätigungsfeld.



Mit dem Klick auf das Symbol des Cold-Hammers befindest du dich im Funktionsdisplay für die ausgewählte Funktion des Cold Hammers.

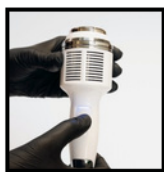

HINWEIS

Das sind Hinweise und keine Fehlermeldungen.

HINWEISE




Wichtiger Hinweis zur Gerätesicherheit

Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob der Dichtungsring korrekt eingesetzt und fest anliegend montiert ist.

Ein nicht ordnungsgemäß sitzender Dichtungsring kann die Vakuumbildung verhindern und dazu führen, dass das Gerät nicht einwandfrei funktioniert. Dies kann die Sicherheit und Wirksamkeit der Anwendung beeinträchtigen.



Der Abfallbehälter muss korrekt in die Schiene eingesetzt und vollständig eingeschoben sein. Andernfalls kann die Funktion des Geräts beeinträchtigt werden.

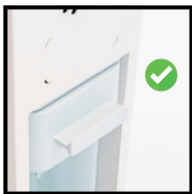

Der Abfallbehälter muss vollständig eingesetzt sein. Ein abstehender Behälter (siehe Abbildung) ist unzulässig und beeinträchtigt die Funktion des Geräts.



WARNHINWEIS

1. Behandlung bei Unwohlsein sofort abbrechen
Bei Schmerzen, starkem Brennen oder ungewöhnlichen Hautreaktionen ist die Behandlung sofort zu stoppen.

2. Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden
Das Gerät darf nur für kosmetische Zwecke und gemäß dieser Anleitung verwendet werden.

3. Elektrische Sicherheit beachten

- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen
- Gerät nicht verwenden, wenn Kabel oder Gerät beschädigt sind
- Vor Reinigung immer vom Stromnetz trennen



4. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Das Gerät ist kein Spielzeug.



KONTRAINDIKATIONEN

1. Schwangerschaft
2. Herzschrittmacher (bei Kombigeräten relevant)
3. Hautkrebs / unklare Hautveränderungen
4. schwere dermatologische Erkrankungen

BEHANDLUNGS- ANLEITUNG

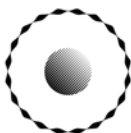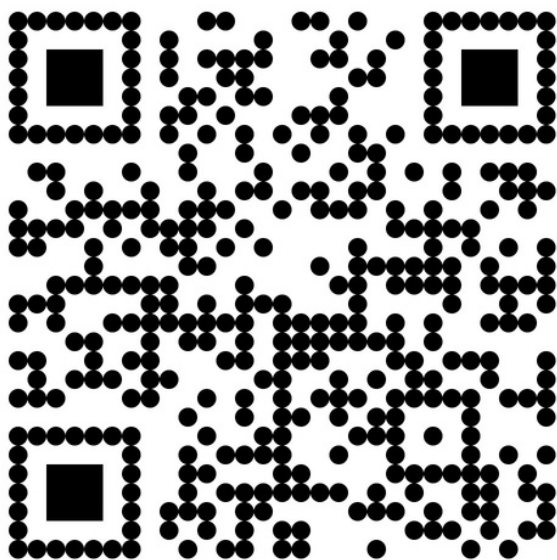

CURE CONCEPT®

Cure Concept GmbH
Bonner Straße 361
D-40589 Düsseldorf
info@cureconcept.de
www.cureconcept.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE47302623
UST ID: DE454385595