

CURE LAYONE®



① INFOBLÄTTER

# Hinweise

## **Allgemeine Sicherheit**

- Die Liege ist ausschließlich für den professionellen Einsatz im Innenbereich bestimmt.
- Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Bedienungsanleitung vollständig zu lesen.
- Das Gerät darf nur von geschultem Fachpersonal verwendet werden.
- Kinder dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Liege aufhalten.

## **Elektrische Sicherheit**

- Vor Anschluss sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Geräteangaben übereinstimmt.
- Gerät nur an ordnungsgemäß installierte Steckdosen anschließen.
- Netzkabel nicht beschädigen, knicken oder einklemmen.
- Gerät nicht verwenden, wenn Kabel oder Bauteile beschädigt sind.
- Vor Reinigung oder Wartung immer vom Stromnetz trennen.

## **Anwendung & Nutzung**

- Maximale Belastbarkeit von 250 kg nicht überschreiten.
- Während der Verstellung dürfen sich keine Körperteile oder Gegenstände im Bewegungsbereich befinden.
- Bewegungen der Liege nur unter Aufsicht durchführen.
- Kunde darf während der Verstellung nicht unbeaufsichtigt sein.
- Die Liege nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.

## **Heizfunktion**

- Heizfunktion nur unter Aufsicht verwenden.
- Nicht bei empfindlicher oder geschädigter Haut ohne Rücksprache einsetzen.
- Temperatur regelmäßig überprüfen, um Überhitzung zu vermeiden.
- Heizfunktion bei Nichtgebrauch ausschalten.

## **Standfestigkeit & Mobilität**

- Vor jeder Behandlung sicherstellen, dass die Liege fest steht.
- Rollen nur zum Bewegen nutzen, anschließend immer fixieren.
- Liege nur auf ebenem, stabilem Untergrund verwenden.

## **Reinigung & Pflege**

- Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz trennen.
- Nur geeignete, materialschonende Reinigungsmittel verwenden.
- Keine aggressiven oder scheuernden Mittel einsetzen.

## **Wartung & Reparatur**

- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Keine eigenständigen Umbauten oder Veränderungen vornehmen.
- Bei Fehlfunktionen Gerät sofort außer Betrieb nehmen.

## **Umgebung**

- Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und extremen Temperaturen schützen.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

# BEDIENUNGSANLEITUNG



Halte den Knopf gedrückt um die Rückenlehne zu verstellen. Mit dem linken Knopf (Pfeil nach oben), fährst Du die Lehne hoch und mit dem rechten Knopf (Pfeil nach unten), fährst Du die Lehne nach unten.



Halte den Knopf gedrückt um die Fußlehne zu verstellen. Mit dem linken Knopf (Pfeil nach oben), fährst Du die Lehne hoch und mit dem rechten Knopf (Pfeil nach unten), fährst Du die Lehne nach unten.



Halte den Knopf gedrückt um die Liege zu verstellen. Mit dem linken Knopf (Pfeil nach oben), fährst Du die Liege hoch und mit dem rechten Knopf (Pfeil nach unten), fährst Du die Liege nach unten.



Halte den Knopf gedrückt um die gesamte Liege zu verstellen.



Halte den Knopf gedrückt um die gesamte Liege in die Startposition zu verstellen.




Drücke auf den Knopf um die Heizfunktion zu aktivieren. Nach ca. 5-10min ist die maximale Temperatur von maximal 45 °C



# Fernbediendung

Legende

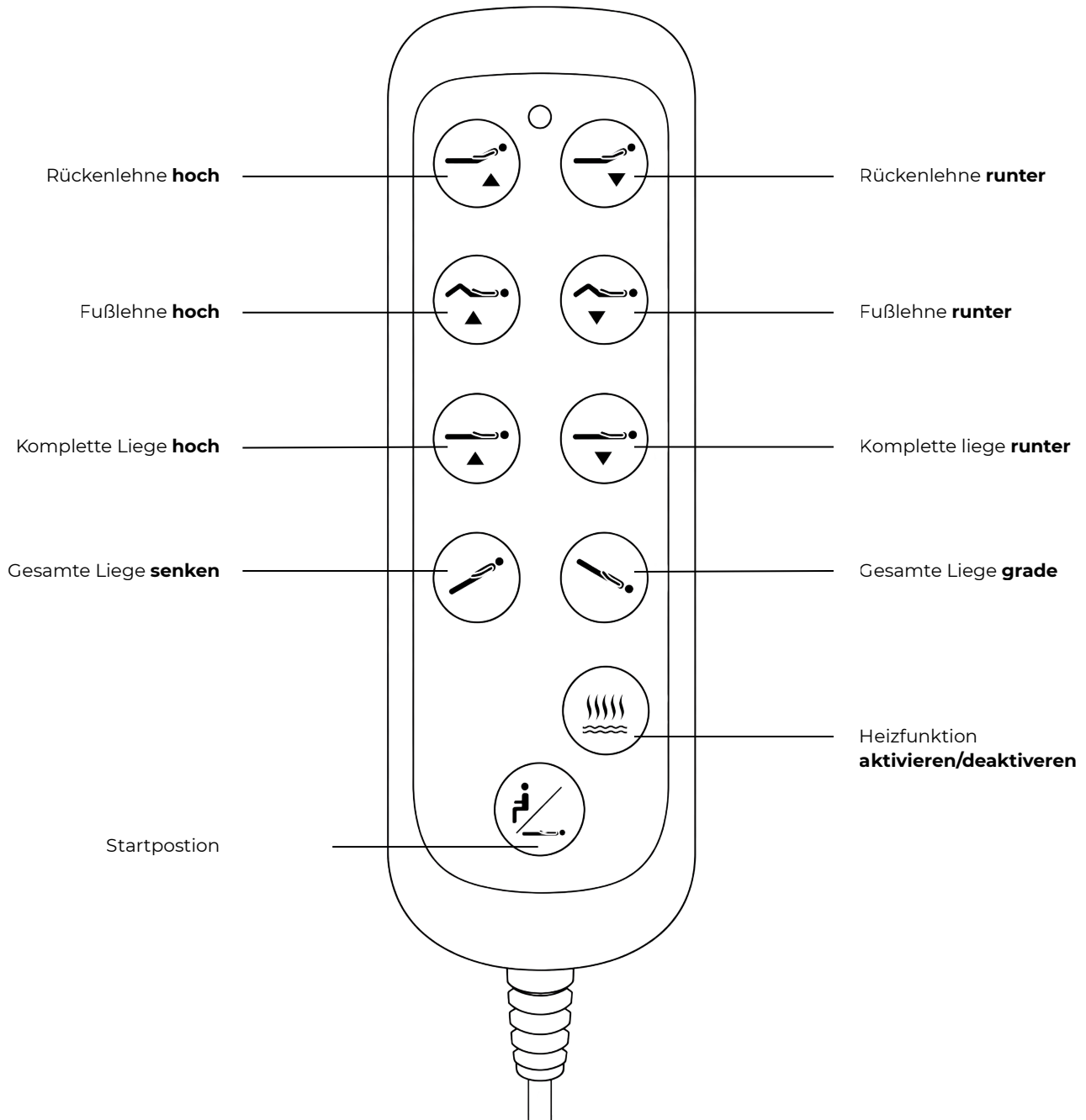

# Rollfunktion

Du kannst den Hebel mit dem Fuß betätigen. Verlager dein Gewicht auf den Fuß um den Hebel zu betätigen und die Rollen zu aktivieren.

 **WICHTIG:** Nachdem die Liege in der Wunschposition platziert wurde, muss die Rollfunktion deaktiviert werden.




**Anleitung im  
Videoformat!**



**Noch Fragen?  
Kontaktiere  
uns!**



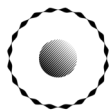

CURE CONCEPT®

Cure Concept GmbH  
Bonner Str. 361  
D-40589 Düsseldorf  
[www.cureconcept.de](http://www.cureconcept.de)  
[info@cureconcept.de](mailto:info@cureconcept.de)